



100%
MADE IN ITALY




LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

HEALTHCARE LINE



**SYSTÈME AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTION
DES SURFACES PROFESSIONNELLE**

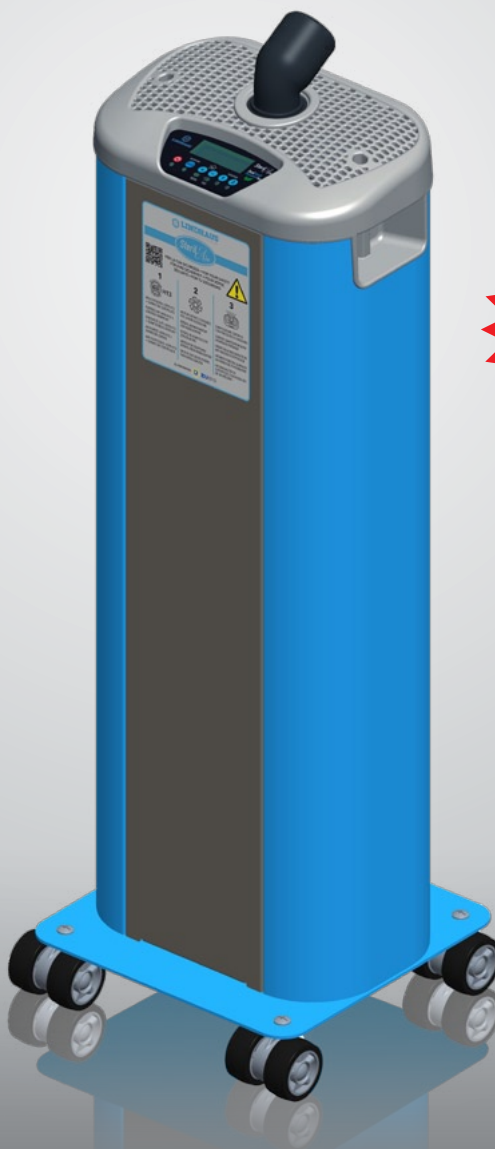


NOVEL
CORONAVIRUS

**PROTECT
YOURSELF
AND OTHERS**



TOUJOURS DEUX PAS EN AVANT

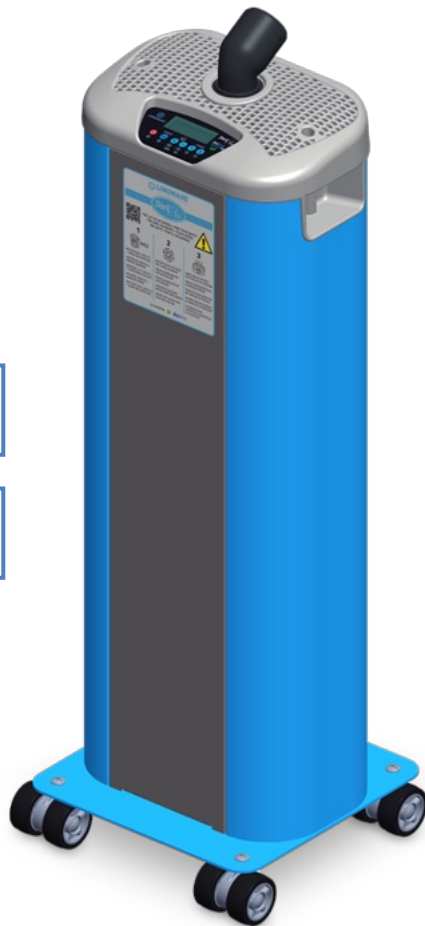

La désinfection des pièces et des surfaces au peroxyde d'hydrogène H_2O_2 est un système approuvé par le ministère de la Santé, non toxique et rapide pour réduire la charge bactérienne et virale de **99,9%** en quelques minutes. Il inhibe la formation de virus et de bactéries.

La fine nébulisation est générée par un puissant moteur soufflant **Rotafil** à deux étages, un mélange de peroxyde d'hydrogène dosé par une pompe et une buse conçue pour nébuliser parfaitement jusqu'à obtenir de l'air presque sec déjà à une distance de 50 cm. Cela se traduit en un rayon d'action de 4 mètres (position 1) ou 6 mètres (pos. 2).

La **rotation à 300°** de la buse de pulvérisation garantit que toute la pièce est désinfectée de manière uniforme. Dans des endroits particulièrement contaminés où il n'y a la présence ni de documents, ni d'appareils électroniques, il y est possible de doubler la concentration de peroxyde en sélectionnant sur le clavier pratique.

EU RCD
N. 008050801-0001



L'air entrant est purifié: avant d'entrer dans le moteur soufflant, il passe à travers un filtre **HEPA H13** qui garantit une efficacité de filtration de **99,97%** à 0,3 μm . Le filtre a une efficacité antibactérienne et antivirale conforme à la norme EN15714:2019 grâce au traitement **I-PROTEC Invisible**.



La technologie d'assainissement **Lindhaus** au peroxyde d'hydrogène est sûre et écologique car elle n'utilise que des éléments **biodégradables**.

Le peroxyde d'hydrogène à une concentration de 1% à 7,9% garantit un résultat **bactéricide et virucide** optimal.



Le bidon de 5 litres pour le peroxyde d'hydrogène à bord de l'appareil garantit de 5 à 10 heures (selon la programmation) de désinfection continue.



POINTS DE FORCE



- Écran LCD avec programmation
- Réglage du volume de la pièce à désinfecter
- Moteur **Rotafil** 2-étages décharge tangentielle 1000W.
- Air réintroduite dans la salle filtré avec un filtre **HEPA H13**
- Structure 100% Acier INOX
- 5l. de peroxyde d'hydrogène à basse concentration à bord de l'appareil
- Les locaux à peine désinfectés sont utilisables après être aérés seulement **30 min.**
- Conçu pour être utilisé sur tout type d'endroits: cliniques, magasins, bureaux, showrooms automobiles, coiffeurs, centres de bien-être, hôtels, restaurants, etc.
- **Facilement transportable** grâce aux poignées et grâce à la base à roulettes l'appareil glisse sans effort d'une pièce à l'autre.





MAGASINS



BUREAUX



SALLES DE GYMNASTIQUE



HÔTELS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SterilAir

Peroxyde d'hydrogène à concentration de 1% ou 7,9% (l)	5
Consommation de produit min. - max (l/h)	0,5 - 1
Autonomie peroxyde min. - max (h)	5 - 10
Capacité d'assainissement max. (m³/h)	800
Débit d'air nébulisé (l/sec.)	50
Rayon d'action - position 1/position 2 (mt.)	4 / 6
Niveau de stérilisation	99,9%
Filtre Hepa H13 efficacité de filtration 99,97% à 0,3 µm	Standard
Niveau sonore db(A)	79
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Puissance absorbée (W)	1100
Écran LCD	Standard
Indicateur remplacement filtre Hepa	Standard
Pompe dosage peroxyde	Standard
Arrêt automatique pompe fin du produit	Standard
Possibilité de doubler la concentration de peroxyde	Standard
Indicateur fin produit sur écran	Standard
Temporisation mise en route cycle	Standard
Signal de fin de cycle retardé	Standard
Port USB téléchargement certificat d'assainissement	Optional
Structure 100% acier inox	Standard
Parties en ABS autoextinguibles V0	Standard
Dimensions (mm)	290x180x820 H
Poids à vide (kg)	16,4



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

DISTRIBUTEUR